

INSTRUCTIE AFNAME KWEKEN PATIENTEN

BENODIGD MATERIAAL

MRSA kweeksetje bevat:

- a) 6 Wattenstokken
- b) 3 Formulieren LMMI
- c) Instructie afname kweken
- d) Retour envelop, alleen van toepassing indien kweek in de thuissituatie afgenomen wordt.

METHODE

U neemt van elke plek; keel, neus en perineum twee kweken af.

Het afnemen van een neuskweek:

- met de wattenstok in beide neusgaten, aan de binnenkant van het topje van de neus, de kweek afnemen.

Het afnemen van een keelkweek:

- met de wattenstok achter in de keel, net boven de huid, de kweek afnemen.

Het afnemen van een perineumkweek:

- met de wattenstok van het stukje huid tussen de anus en uitwendige geslachtsdelen, de kweek afnemen.

Van eventuele wond(en) wordt per locatie één kweek afgenomen:

Het afnemen van een wondkweek:

- met de wattenstok van het wondgebied de kweek afnemen.

Bij aanwezigheid van een verblijfscatheter wordt er één urinekweek afgenomen:

- de urine wordt uit de catheter opgevangen in een urinepotje.

Het afnemen van de kweken mag achter elkaar, zonder tussenpose en met een droge wattenstok.

Per materiaal 1 formulier.

Invullen formulieren en stokken:

Op het formulier vermelden:

- patiënt informatienummer (indien bekend)
- achternaam
- geboortedatum
- geslacht
- huisadres

Op het busje van de stok vermelden:

- achternaam
- materiaal

Bij klinische gegevens:

- datum en tijd van afname
- materiaal
- reden van afname

TRANSPORT EN BEWAARCONDITIES

Kweken per patiënt bundelen in een zakje. (geen plakband, nietjes of elastiekjes gebruiken) Het afgenomen materiaal dient naar de ruimte 'afgifte patiëntenmateriaal' van het *Klinisch Chemisch Laboratorium* gebracht te worden. Leg het zakje in de koelkast bestemd voor het *Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten* (LMMI). Indien de kweken thuis afgenomen worden, verpak het materiaal voor verzending per post met het lekdoekje in de bijbehorende safety bag. Verwijder de afdekstrip van de safety bag en sluit deze goed. Stop de safety bag samen met het aanvraagformulier in de blauwe verzendenvolp en rits dicht.

Bewaar het materiaal tot transport in de koelkast. Zie ook www.isala.nl/lmmi.

Bij vragen: neem contact op met de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie, doorkiesnummer 4253, 4616, 4104, 4641 of 7308.