


Technische aantekening – ALGO[®] 3i Newborn gehoorscreener op een rolstandaard monteren

Deze technische aantekening bevat informatie over de wijze waarop de ALGO 3i screener aan een rolstandaard kan worden bevestigd en met een rolstandaard kan worden gebruikt.

De ALGO 3i gehoorscreener voor neonaten kan op een rolstandaard worden gemonteerd aan de hand van de Natus rolstandaardadapter zoals hier te zien is.


N.B. De rolstandaard wordt niet door Natus geleverd maar is algemeen verkrijgbaar bij leveranciers van medische apparatuur. Gebruik een door uw ziekenhuis goedgekeurde rolstandaard.

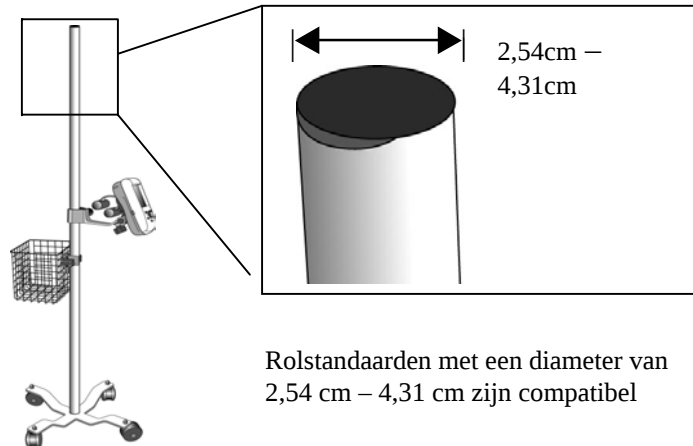

Met een ALGO 3i apparaat dat op een rolstandaard is gemonteerd, kunt u:


1. het ALGO 3i systeem gemakkelijk verplaatsen
2. een baby screenen met het apparaat op ergonomische hoogte
3. screeningbenodigheden en ALGO 3i accessoires wegbergen

Natus levert een rolstandaardadapter (REF 040710) met de ALGO 3i screener. Met de adapter kunt u het ALGO 3i apparaat aan een rolstandaard bevestigen.

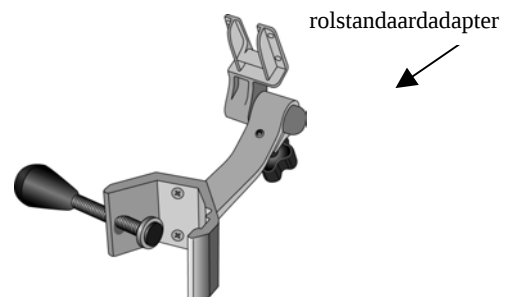


Natus raadt aan om de lange patiëntkabels, de Preamp3/PCA 3 (voorversterker- of sensorkabel) (REF 040664) en de ATA3 (transducer- of oortelefoonkabel) (REF 040520), met de rolstandaardadapter (REF 040710) te gebruiken.

N.B. De lange voorversterker- of sensorkabel, de Preamp 3/PCA 3 kabel (REF 040664,) is ook bekend als de combinatie van Preamp3 kabel (REF 030534) en PCA 3 kabel (REF 040518)

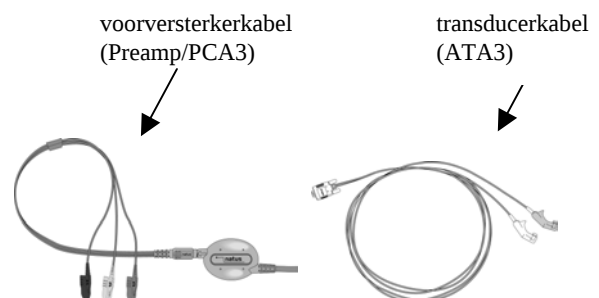


Technische aantekening – ALGO[®] 3i Newborn gehoorscreener op een rolstandaard monteren**ALGO 3i screener op een rolstandaard bevestigen**


1. Ga als volgt te werk om de adapter aan de rolstandaard te bevestigen: draai de schroef (A) los, plaats de adapter op de standaard en draai de schroef (A) vervolgens stevig vast.

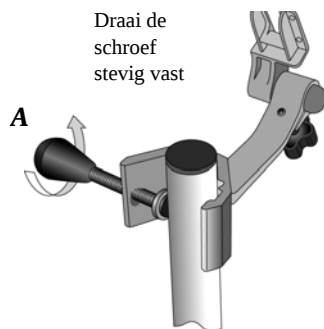


2. Bevestig de ALGO 3i screener aan de adapter door het apparaat in de adapter te schuiven en vast te klemmen.

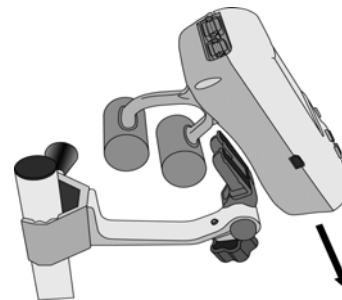**Rolstandaardadapter bijstellen**

1. Stel de hoogte als volgt bij: draai de schroef (A) los, schuif de adapter omhoog of omlaag (B) en draai de schroef (A) vervolgens vast.

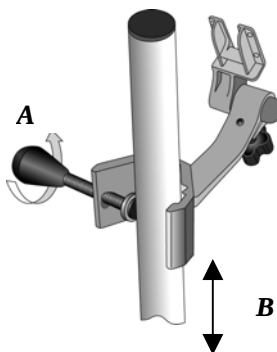

2. Draai de adapter als volgt: draai de schroef (A) los, draai de adapter om de standaard (B) en draai de schroef (A) vervolgens vast.

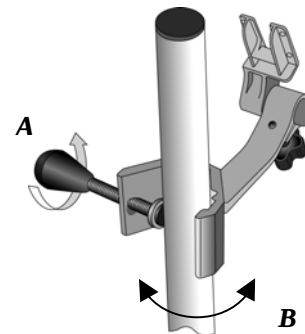

3. Zet de A3i screener als volgt onder de gewenste hoek: draai de onderste schroef (A) van de adapter los, zet de screener meer of minder schuin (B) en draai de schroef (A) vervolgens vast.

